

RIONET 2

リオネット

暮らしと、
私に溶け込む



クオリエンス
新登場

RIONET



暮らしと、
私に溶け込む

毎日の暮らしに溶け込むように
より使いやすくなったリオネット2シリーズ。
それは日々の暮らしの中で欠かせない
「聞こえ」の質を快適なまでに高めてくれます。
つけていることを忘れるほど、
自然体でいられる1日を。



リオネット2シリーズの特長

聞こえ

AI(人工知能) × リオネットエンジン2で
クリアで最適な聞こえを実現

つながる

補聴器とテレビやスマートフォンがつながり
テレビ視聴や通話が快適に

使いやすさ

充電式で電池交換の煩わしさを解消
丸1日使える内蔵充電電池を搭載




朝食で団らん。
家族の会話が朝からはずむ。



リオネット初AI搭載モデル

デジタル機能向上でクリアで最適な「聞こえ」を。

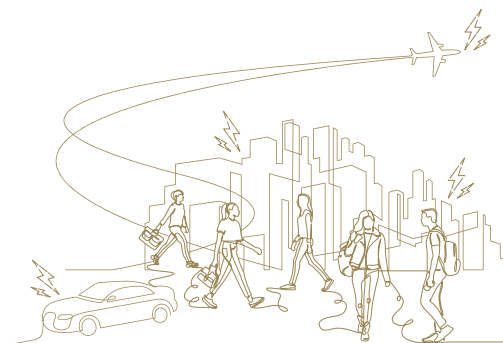


AI × リオネットエンジン2

リオネットの最新技術を結集したリオネット
エンジン2がクリアで自然な聞こえを実現。
さらに、膨大な音環境を学習したAI(人工
知能)搭載により、AI NR(騒音抑制機能)*
が音声とそれ以外の音を区別し、聞こえを
最適化します。

*マキシエンス/マキシエンスVのみ搭載

With RIONET2 SERIES
a day
pm 1:00
With RIONET2 SERIES

午後の心地よいひととき。 会話をすることが、楽しみになる。

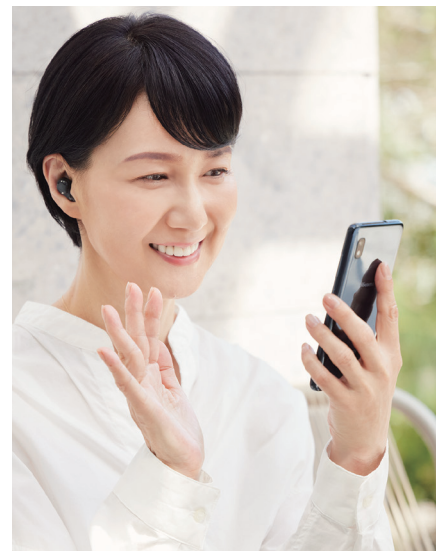

最適な聞こえに自分でコントロール
いつでもどこでも、スマホアプリで手軽に調整。

スマホ・タブレットとつながる
通話や音楽鑑賞も、思いのままに。




自分に合った好みの聞こえに
スマホひとつでかんたん調整

セルフ調整機能*1で音質、
デジタル機能の調整が可能。
環境に応じてご自身で聞こえを調整できます。



セルフ調整機能はスマートフォンアプリ
「スマートコントロール2」でご使用いただけます。

*1 マキシエンス/マキシエンスVのみ搭載

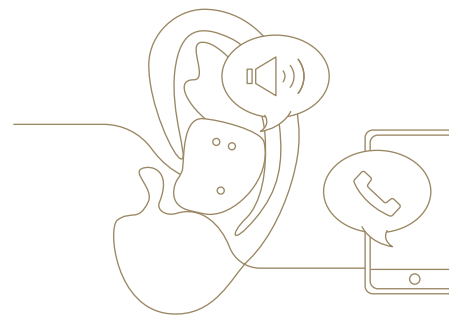

スマホ・タブレットの音声
補聴器へ直接届く*2

補聴器からスマホ・タブレットの音声
が直接聞こえるので、
よりクリアな音質で通話や音楽鑑賞、
動画視聴が楽しめます。


*2 iOS 14以降を搭載したiPhone、iPod touchおよび
iPadOS 14以降を搭載したiPadに対応しています。
Androidについては、補聴器のアップデートによりLE
Audioに準拠したスマートフォン、タブレットに今後連
携が可能となります。

WITH RIONET2 SERIES
a day
pm 8:00
WITH RIONET2 SERIES

夜のひとときをゆったりリラックス。心地よい音が、いつまでも続く。




テレビ視聴をより快適に
自分に合った音量で、心置きなくテレビ視聴を楽しめる。

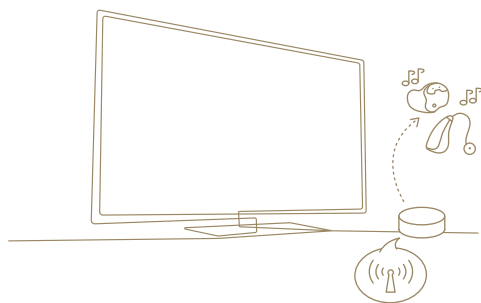

テレビの音声が
補聴器へ直接届く

テレビにテレビアダプターを
接続することで、
テレビの音声が補聴器へ直接届きます。
家族や友人とテレビ視聴を
もっと楽しめます。

電池交換が不要で煩わしさを解消
毎日使うものだから、より手間なく快適に。

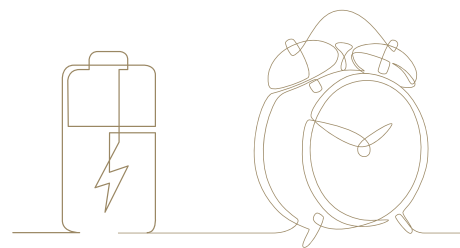

おやすみ前に充電すれば、
翌朝から1日中使用可能

電池交換が不要な充電式で、
扱いがとても楽に。
電池切れを心配することなく、
朝から夜まで、1日中安心して使えます。

リオネット2シリーズ グレードラインアップ



「聞こえ」の質を快適なまでに
高めた最高峰モデル。

GAIN / 24 band	CRC / 24 ch
無料修理 4 年	事故補償 4 年
紛失補償 2 年	充電池無料交換 2 回



マキシエンスの
優れたエッセンスを凝縮。

GAIN / 18 band	CRC / 18 ch
無料修理 4 年	事故補償 2 年
紛失補償 1 年	充電池無料交換 1 回



高性能をそのままに
価値ある機能を厳選。

GAIN / 12 band	CRC / 12 ch
無料修理 3 年	事故補償 1 年



確かな基本性能を備えた
エッセンシャルモデル。

GAIN / 10 band	CRC / 10 ch
無料修理 3 年	事故補償 1 年



より手軽にはじめやすい
ベーシックモデル。

GAIN / 8 band	CRC / 8 ch
無料修理 2 年	事故補償 1 年

耳あな型全3カラー



スモーキーブラック
Smoky Black



アッシュブラウン
Ash Brown



ベージュ
Beige

耳かけ型全4カラー



スモーキーブラック
Smoky Black



アッシュブラウン
Ash Brown



カームグレー
Calm Gray



ペールラベンダー
Pale Lavender

耳あな型オーダーメイド補聴器

防水・防じん
保護等級
IP68

マキシエンス マキシエンスV プレミエンス プレミエンスV クオリエンス
[HI-C7DA / HI-C7DB / HI-C7DC / HI-C7DD / HI-C7DE]


軽度～重度難聴対応



※オーダーメイド補聴器は、個人の耳の形や大きさによってサイズや形状が異なります。また、難聴の程度によっては、サイズが大きくなる場合があります。

[オーダーメイド補聴器とは]

- POINT 01** オーダーメイド補聴器は、お客様一人ひとりの耳の形や聴力に合わせてお作りする「お客様専用」の補聴器です。
- POINT 02** それぞれの耳の形に合わせてお作りするため、耳にぴったりと収まり、より自然な装用感を得られます。
- POINT 03** 鼓膜により近い場所に収まるため、耳本来の聞こえ方に近づき、より自然な聞こえを可能にします。
- POINT 04** 耳にすっきり収まる設計で、マスクやメガネ、電話の使用時にも邪魔になりません。

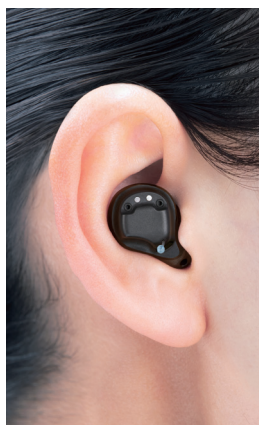

耳かけ型補聴器 (RIC)

防水・防じん
保護等級
IP68

マキシエンス マキシエンスV プレミエンス プレミエンスV クオリエンス
[HB-A8DA / HB-A8DB / HB-A8DC / HB-A8DD / HB-A8DE]



[幅広い難聴レベルに対応する3つのイヤホン]



軽度・中等度
EX スモールイヤホン



軽度～高度
ミディアムイヤホン



中等度～重度
EX パワーイヤホン
カラー：ブラウン・ベージュ



〈 刻印サービス 〉 お客様のお名前などをお入れする

サービスを行っています。(HB-A8は有料オプション)



アクセサリー

テレビアダプター

テレビに接続することで、補聴器へ直接、音を届けます。

RH-07 1年保証



リモコン

ボリューム調整、メモリー切替、ミュート切替が可能です。

RH-08 1年保証



充電ケース(HI-C7用)

2時間30分の充電で1日中使用可能です。

HX-C7 1年保証



充電ケース(HB-A8用)

4時間の充電で1日中使用可能です。

HX-A8 1年保証



スマートフォンアプリ

スマートコントロール2*1

ボリューム調整、メモリー切替の他、補聴器の電池残量表示やセルフ調整機能*2の使用などが可能です。また、補聴器を紛失した際に補聴器の推定位置を表示することができます。*3



アプリのダウンロードはこちらから



*1 対応OS、対応端末につきましては、販売店までお問い合わせください。

*2 マキシエンス/マキシエンスVのみ搭載。

*3 補聴器の電源が入っていない場合や、補聴器とスマートフォンの距離が離れている等によって補聴器とスマートフォンが接続されていない場合は、「補聴器とスマートフォンの通信が最後に切断された場所」を表示します。

- Apple, iPhone, iPad, iPod touchおよびAppleのロゴは、Apple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、日本国内ではアイホン株式会社のライセンスに基づき使用しています。
- Android, Google PlayおよびGoogle Playのロゴは、Google LLCの商標です。

安心保証制度

最長4年間の無料修理

お買い上げの日より、マキシエンス・マキシエンスVは4年以内、プレミエンス・プレミエンスVは3年以内、クオリエンスは2年以内に自然故障が生じた場合、無料で修理いたします。

紛失補償

(マキシエンス・マキシエンスVのみ)

お買い上げの日より、マキシエンスは2年以内、マキシエンスVは1年以内に補聴器を紛失、破損、故障した場合、1回に限り同等機種による代替品提供(紛失、修理不能の場合)または無料修理をさせていただきます。

火災、盗難などにあったときの事故補償

お買い上げの日より、マキシエンスは4年以内、マキシエンスVは2年以内、プレミエンス・プレミエンスV・クオリエンスは1年以内に補聴器が破損、火災、盗難にあった場合、無料修理または同等機種による代替品提供(修理不能の場合)をさせていただきます。

充電電池無料交換

(マキシエンス・マキシエンスVのみ)

お買い上げの日より4年以内に、マキシエンスは2回、マキシエンスVは1回に限り、充電電池を無料で交換させていただきます。(当社基準によります)

オーダーメイド補聴器の無料調整/再製作

お買い上げの日より120日以内に、オーダーメイド補聴器の形・大きさが耳に合わない場合、無料で何度でも調整/再製作いたします。

主要機能一覧

〔耳あな型オーダーメイド補聴器〕



	マキシエンス HI-C7DA	マキシエンスV HI-C7DB	プレミエンス HI-C7DC	プレミエンスV HI-C7DD	クオリエンス HI-C7DE
利得調整器(バンドゲイン)	24band	18band	12band	10band	8band
AI NR*1	○	○	-	-	-
騒音抑制	7段階	6段階	5段階	4段階	2段階
残響抑制	3段階	2段階	1段階	-	-
音声強調	3段階	3段階	3段階	3段階	2段階
ハウリングキャンセラー	○	○	○	○	○
衝撃音低減	3段階	3段階	3段階	2段階	1段階
指向性	4パターン	4パターン	4パターン	3パターン	2パターン
自動モード切替	3機能	3機能	2機能	2機能	-
セルフ調整機能*2	○	○	-	-	-
販売名	補聴器 HI-C7DA	補聴器 HI-C7DB	補聴器 HI-C7DC	補聴器 HI-C7DD	補聴器 HI-C7DE
医療機器認証番号	305AABZX00011000	305AABZX00011A01	305AABZX00011A02	305AABZX00011A03	305AABZX00011A05

〔耳かけ型補聴器(RIC)〕



	マキシエンス HB-A8DA	マキシエンスV HB-A8DB	プレミエンス HB-A8DC	プレミエンスV HB-A8DD	クオリエンス HB-A8DE
利得調整器(バンドゲイン)	24band	18band	12band	10band	8band
AI NR*1	○	○	-	-	-
騒音抑制	7段階	6段階	5段階	4段階	2段階
残響抑制	3段階	2段階	1段階	-	-
音声強調	3段階	3段階	3段階	3段階	2段階
ハウリングキャンセラー	○	○	○	○	○
衝撃音低減	3段階	3段階	3段階	2段階	1段階
指向性	4パターン	4パターン	4パターン	3パターン	2パターン
自動モード切替	3機能	3機能	2機能	2機能	-
セルフ調整機能*2	○	○	-	-	-
販売名	補聴器 HB-A8DA	補聴器 HB-A8DB	補聴器 HB-A8DC	補聴器 HB-A8DD	補聴器 HB-A8DE
医療機器認証番号	305AABZX00071000	305AABZX00071A01	305AABZX00071A02	305AABZX00071A03	305AABZX00071A05

*1 AI NRは東京都立大学との共同研究の成果が一部含まれます。*2 スマートフォンアプリを使用。

性能一覧

【 HI-C7DA / HI-C7DB / HI-C7DC / HI-C7DD / HI-C7DE 】

	最大音響利得		90dB入力最大出力音圧レベル		電池	連続 使用時間*	適応聴力範囲*
	HFA [±5dB]	ピーク値 [+3dB以下]	HFA [±4dB]	ピーク値 [+3dB以下]			
イヤホン中	57dB	63dB	123dB	126dB	内蔵充電電池	約27時間	30～95dBHL
イヤホン大	62dB	68dB	126dB	130dB		約28時間	45～110dBHL

【 HB-A8DA / HB-A8DB / HB-A8DC / HB-A8DD / HB-A8DE 】

	最大音響利得		90dB入力最大出力音圧レベル		電池	連続 使用時間*	適応聴力範囲*
	HFA [±5dB]	ピーク値 [+3dB以下]	HFA [±4dB]	ピーク値 [+3dB以下]			
EX スモール イヤホン	38dB	44dB	105dB	110dB	内蔵充電電池	約34時間	～70dBHL
ミディアム イヤホン	51dB	57dB	114dB	116dB		約36時間	25～90dBHL
EX パワー イヤホン	65dB	69dB	125dB	129dB		約33時間	50～110dBHL

○ []内は許容差を表します。○実際の電池寿命は、デジタル機能、調整、使用環境などの影響により異なります。詳しくは、販売店までお問い合わせください。○規格値はJIS C 5512:2015による。(*は除く)

リオネット補聴器のご相談は…

その聞こえのためにすべてを。

RIONET

リオネット株式会社

〒185-8533 東京都国分寺市東元町3-20-41

☎ 0120-2933-76 FAX 042-359-7441

●きこえが気になったら、まずは耳鼻咽喉科での診察をお勧めします。●補聴器の使用をご希望の場合は、あらかじめ耳鼻咽喉科専門医の診察をお勧めします。●補聴器をご使用前には添付文書及び取扱説明書を必ずご参照ください。●大きな音で聴かないでください。耳を傷めることがあります。●補聴器は使用開始前に個々の難聴や「きこえ」の程度に合わせてフィッティング(調整)することが必要です。●補聴器は適切なフィッティング(調整)によりその効果が発揮されます。しかし、装用者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。●耳を治療中の方は耳鼻咽喉科専門医にご相談の上お使いください。●他人に補聴器を貸したり、または補聴器を借りて使わないでください。他の人があなたの補聴器を使っても耳に合わず、耳を傷める恐れがあります。

※本カタログ掲載の商品のデザイン・仕様等は予告なく変更する場合があります。
※本カタログ掲載の商品の色は印刷のため、実物の色と若干異なる場合があります。
※本紙は、環境に配慮した揮発性有機化合物を含まない「ベジタブルオイルインキ」を使用しています。

リオネット2の製品情報はこちら

www.rionet.jp/rionet/2/

